



Guía de inicio rápido

Tensiómetro LTE

PYLO 802-LTE

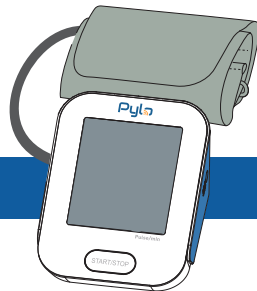


1

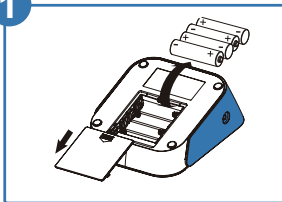

Inserte las 4 baterías tipo AA incluidas con el dispositivo.

Una vez puestas las baterías, el dispositivo iniciará el emparejamiento inicial seguro con la red móvil.


2

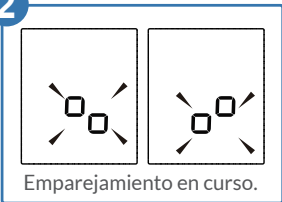

Emparejamiento en curso.

Durante el emparejamiento, se mostrarán los símbolos \square_{\square} y \square^{\square} . Este proceso suele durar unos 10 segundos, pero puede tardar hasta un minuto si la señal es débil.

3

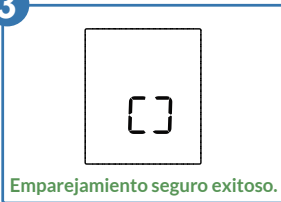

Emparejamiento seguro exitoso.

Cuando el emparejamiento se haya completado con éxito, se mostrará el símbolo \square_{\square} y la pantalla se apagará.


¡El dispositivo ya está listo para su uso!

4




Conecte el tubo del brazalete en el dispositivo. Asegúrese de utilizar el puerto etiquetado como "Cuff Port" ("puerto del brazalete") y no el puerto del adaptador de corriente opcional.

5

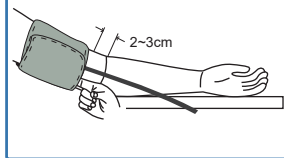


Envuelva el brazalete alrededor de su brazo y posícelo antes de apretarlo. Asegúrese de leer y seguir la guía de "cómo tomar su presión" que se incluye con el monitor.

6

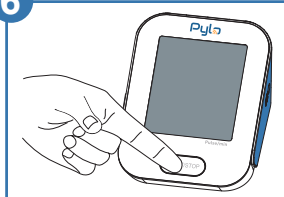


Pulse el botón de inicio/detener ("START/STOP") para encender el monitor. El brazalete se inflará, tomará la lectura y luego se desinflará. Permanezca inmóvil hasta que el brazalete se haya desinflado por completo.


7

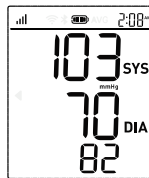


Sus resultados se mostrarán y se guardarán en el dispositivo antes de iniciar la transmisión.

8

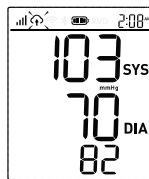

Durante la transmisión de datos, aparecerá el símbolo . Este proceso suele durar unos 10 segundos, pero puede tardar más si la señal es débil.

9

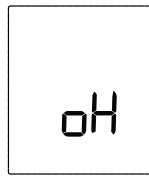

Transmisión exitosa.

Si la transmisión es exitosa, se mostrará el símbolo .

Si la conexión falla, se mostrará E5 o E6. En este caso, la medición se guardará y se enviará durante la siguiente conexión exitosa.



Para más información, consulte el manual de instrucciones completo.

Pylo